

Eugenolový olej

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 100% eugenolový olej

URČENÍ

EUGENOL slouží jako tekutá složka k přípravě past pro vyplnění kořenových kanálků a materiálů pro provizorní vyplnění kavit. Používá se zejména v kombinaci s oxidem zinečnatým.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Směs pro provizorní vyplnění kavit musí být zpracována tak, aby se pasta nelepila ke skleněné nádobce ani lopatce. Namíchaná směs pro výplň kořenových kanálků musí mít krémovou konzistenci.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

Nepoužívejte pro kompozity, protože eugenol zabraňuje polymeraci. Nepoužívejte u těhotných žen.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Dráždí sliznici ústní dutiny a oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vypijte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte proti slunečnímu záření.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci. OBAL

Lahvička s kapátkem a obsahem 10 ml nebo 20 ml přípravku.



25°C



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85