

schülke →



Tekutý přípravek pro čištění a péči o odsávací systémy v zubní praxi. Odbourávají organické i anorganické úsady ve vnitřních kruzích a hadicích a zabezpečují jejich hygienickou a zdravotní nezávadnost.

Nepění

aspirmatic® cleaner

Naše Plus

- Bez aldehydů
- Snadné a účinné čištění
- Odbourávají organické a anorganické úsady v hadicích
- Vyzkoušeny v rozsáhlém praktickém testu na předním zubařském vybavení (KaVo, Ritter, Sirona)
- Pro všechny druhy odlučovačů amalgámu
- Nepěnlivý
- Ekonomický

Oblast použití

Speciální týdenní čištění dentálních odsávacích systémů a plivátek

Návod na použití

aspirmatic® cleaner se používá pro speciální pročištění odsávacích zařízení 1-2x týdně namísto polední dezinfekce. Pro každé jednotlivé zubařské zařízení se použije 2l pracovního roztoku o koncentraci 5% (100 ml **aspirmatic® cleaner** a 1900 ml vody). Z toho 1,5 litru se nechá nasát do odsávacích hadic a zbylý 0,5 litr se aplikuje do odtoku plivátka. Roztok přípravku **aspirmatic® cleaner** se nechá působit minimálně po dobu 1-2 hodin tak, aby se stihly uvolnit odolné nečistoty. Po této době je potřeba nasát do odsávacího zařízení dostatek vody tak, aby se nečistoty uvolnily z hadic. Pokud je odsávací systém silně zanesen, je možné použít až 10% roztok. Nepřekračujte dobu expozice. Pro aplikaci roztoků do odsávacích zařízení je možné využít aplikační pomůcku **aspirmatic® systém**. Využitím **aspirmatic® systému** se aplikace roztoků stává příjemnou rutinou. **aspirmatic® systém** je speciální odměrná nádoba s adaptérem na hadice odsávacích zařízení, která zajišťuje optimální naplnění odsávacího systému

zubařského vybavení. Do nádoby se připraví roztok přípravku **aspirmatic®** nebo **aspirmatic® cleaner** a na hadice nádoby se jednoduše připojí adaptér zubařského vybavení.



aspirmatic® cleaner

Složení

aspirmatic® cleaner obsahuje:
neionogenní tenzidy, organické kyseliny, inhibitory koroze,
barviva

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	žlutý
Dynamická viskozita	Data neudána
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
pH	cca. 0,9 / 20 °C / koncentrát
Zápalná teplota	> 100 °C / Metoda : ISO 2719

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice.
Doba expirace: 3 roky

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Aspirmatic cleaner 2 l	5/Karton	150313



Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. I



GERÄTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.



Člen skupiny Air Liquide-Group

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com